

Bruksanvisning KK100



KNOP REHATEK AB
GIAB huset
Ankdammsgatan 35
SE-171 67 Solna
Tel: 020- 12 12 34

Bruksanvisning för ping pong kontakt KK100

1.1 Allmänt

Produktens tilltänkta funktionsområde är att aktivera ett externt larm genom att trycka på kontakten.

1.2 Placering

KK100 skall monteras så att brukaren kan nå kontakten med t.ex. huvudet eller annan kroppsdel. 3,5mm kontakten monteras i lämpligt larm uttag, t.ex. sändaren TX-900-1 från KNOP Rehatek AB.

För att underlätta montering och användning av ping pong kontakten, kan den fås i ett set med svanhals och superklämma, kontakta KNOP Rehatek AB för ytterligare information.

1.3 Inställning

1. Rikta in kontakten så att brukaren kan nå kontakten
2. Låt brukaren aktivera kontakten, "larmet" skall gå

1.4 Miljö

Produkten innehåller elektronik.

När produkten är förbrukad får den inte kastas med vanligt hushållsavfall utan skall återvinnas som el-avfall.



Kontakta din kommun om du inte vet var du kan lämna in el-avfall.

1.5 Tekniska data

Artikel nr:	KK100
Batterier:	Inga
Anslutning:	2 st 3/8" hona Sladdlängd 3m med monterad 3,5mm telepropp (hane)
Tillbehör:	Svanhals 30cm eller 52cm och superklämma (Artikel nr: KK100-30 eller KK100-52)

