

Bruksanvisning Buddy Button



KNOP REHATEK AB

GIAB huset

Ankdammsgatan 35

SE-171 67 Solna

Tel: 020 – 12 12 34

Introduktion

Buddy Button är en manöverkontakt som kan användas till en mängd olika produkter och system som kan aktiveras med hjälp av en yttre kontakt.

Handhavande

Buddy Button manöverkontakter är lätta och trevliga att använda. De är lätttryckta och lämpliga att använda för omgivningskontroll, kommunikationshjälpmedel, larm osv.

Buddy Button finns i flera färger och det krävs väldigt liten manöverkraft, ett tryck motsvarande ca 100 gram räcker på yttersidan av kontakten, mitt på krävs ca 150 - 200 gram.

Anslutning görs med en standard 3,5mm telepropp till kompatibel produkt.

Säkerhet och underhåll

Manöverkontakten testas genom att trycka på den och ansluten funktion skall då aktiveras.

Vid rengöring, använd en lätt fuktad trasa med vatten eller alkohol.

Dra inte i kontaktens kabel, och linda kabeln separat när den inte används.

Alla ingående delar i systemet bör testas regelbundet.

Miljö

Produkten innehåller elektronik.

När produkten är förbrukad får den inte kastas med vanligt hushållsavfall utan skall återvinnas som el-avfall. Kontakta din kommun om du inte vet var du kan lämna in el-avfall.



Tekniska data

Artikelnr:	TK630<färg>
Diameter:	63 mm
Höjd:	15 mm
Manöverkraft:	100 - 200 gram
Kapslingsklass:	IP41
Driftsmiljö:	Inomhus, <90% luftfuktighet, 0-40°C
Anslutning:	3,5 mm telepropp med 1 m kabel
Vikt:	60 gram
Färg:	Blå, grön, gul och röd med svart kabel

