

# Bruksanvisning

# RX901B





## ***Innholdsfortegnelse***

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Advarsler og sikkerhetsinstruksjoner | 3  |
| Tiltenkt bruk                        | 4  |
| Igangkjøring                         | 5  |
| Startskjermen                        | 6  |
| Nødanrop                             | 8  |
| Hovedmeny                            | <b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b> |
| Vedlikehold                          | 20                                       |
| Rengjøring                           | 22                                       |
| Tilbehør                             | <b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b> |
| Sjekk dekningsområdet                | 23                                       |
| Tekniske data                        | 24                                       |
| Symbolforklaring og godkjenninger    | 25                                       |



## Advarsler og sikkerhetsinstruksjoner



- Batteriet i dette produktet oppfyller de relevante IEC-sikkerhetsstandardene for batterier.
- Les sikkerhetsinstruksjonene på strømforsyningen før du bruker den.
- Strømforsyningsenheten må oppfylle de relevante IEC-sikkerhetsstandardene.
- Ved utskifting av strømforsyningsenhet eller ladeplate må du bruke originale og/eller godkjente enheter.
- Batteriet må ikke skiftes, men produktet må sendes til reparasjon.
- Les tiltenkt bruk før du bruker den.



## **Tiltenkt bruk**

RX901B er en mottaker designet for å fungere med trådløse KNOP-enheter.

Enheter kan bæres i en lomme eller på et halskjede rundt halsen.

Opptil 250 sendere kan kodes og tildeles et navn etter eget valg.

De siste 50 samtaler lagres i en liste hvor du kan se tidspunktet for samtalen, hvor samtalen kom fra og om den ble bekreftet.

Med en RX901B er det for eksempel mulig å dele opp klienter ved en omsorgsinstitusjon i grupper, for eksempel i forbindelse med turnusplaner, hvor nattvakten skal betjene flere klienter enn dagvakten.

RX901B er utstyrt med en posisjonsleser, slik at den kan brukes i KNOP posisjoneringssystem.

Med RX901B er det mulig å foreta et nødalarmering til en annen kollega med et enkelt trykk.

Bruken er menystrukturert i et grafisk display og styres ved hjelp av tastaturet.

RX901B er utstyrt med et oppladbart batteri og trådløs lading.

Produktet er vanntett (IP65).

## Igangkjøring

Det anbefales å lade RX901B til 100 % før bruk.

Den medfølgende trådløse laderen kobles til adapteren via USB-kabelen.

RX901B er plassert på toppen av ladeplaten og RX901Bs display lyser og viser batteriladenivået i prosent.

Hvis enheten er helt utladet, kan det ta opptil 5 minutter før displayet lyser.

### Pakkeinnhold:






### RX901B i laderen:



Når produktet slås på for første gang, må ønsket språk velges.



Trykk   for å flytte den grønne pilen til ønsket språk.

Trykk  for å velge språk.



## Startskjermen

Første gang enheten skal slås på etter utpakking, må den plasseres på laderen. Når RX901B ikke er koblet til laderen, slår skjermen seg av ca. 10 sekunder etter siste handling. Hvis du trykker på en tast, slås displayet på og viser klokkeslett og dato. Brukerens navn vises øverst hvis kodet ellers er "RX901B".



### Alternativer på startskjermen:






Navnet på f.eks. et produkt eller et sted kan endres til ønsket navn.





Klokken må stilles.



### Batteristatus:

-  Batteri OK.
-  Lading anbefales.
-  Batteriet er nesten tomt og må lades.





### Alarm lyd:


-  Alarmlyden er på.
-  Alarmlyden er slått av.

### Vibrator:

-  Vibratoren er aktivert.
-  Vibratoren er slått av.

### System - vises kun hvis systemet er tilkoblet:

-  Systemet er tilkoblet.
-  Kobles til systemet.
-  Avbrudd av systemets signal.
-  Systemsignalet har gått tapt.

Trykk  for å se anropslisten.




## Motta alarmer

Når mottakeren mottar en alarm fra en kodet sender, vises navn, type og tidspunkt for mottak og eventuell posisjon.



Kundens navn  
Navnet på det valgte stedet i huset.  
Type sender.  
Plassering for alarmen.  
Nødknapp / funksjon.

De enkelte tekstene vises kun hvis de er kodet eller kjent.

Trykk  for å bekrefte alarmen.


Trykk  for å avvise.

**Merk:** I det enkle systemet håndteres alarmanropet på samme måte, uansett om det aksepteres eller avvises, i stedet for som i KNOPs repeatersystem (MR90X/RP90X) hvor alarmen automatisk videresendes til andre mottakere.

Hvis alarmen ikke besvares, høres korte lyder omtrent hvert femte minutt.

Når en melding mottas fra en avsender, f.eks. med lavt batterinivå, vises meldingen nedenfor.



Trykk  for å bekrefte alarmen.

**Merk:** "Nylig anrop" viser meldingen "lavt batteri" for senderen der batteriet må skiftes.



## Nødanrop

Det er mulig å sende et nødanrop (eller alarm) fra mottaker til andre brukere, for eksempel for å indikere "jeg trenger hjelp" hos en klient eller som en overfallsalarm.

Nødanropet aktiveres ved å trykke på KNOP-logoen.

Når nødanropet sendes, vibrerer mottakeren én gang og når nødanropet mottas av en annen bruker, vibrerer mottakeren tre ganger.










## Batterialarm

Mottakeren indikerer batteristatus på displayet og når batteriet er utladet med lydindikasjoner.

### **Batteristatus:**

-  Batteri OK .
-  Lading anbefales.
-  Batteriet er nesten tomt og må lades.

Hvis symbolet endres til rødt, sett umiddelbart enheten inn i laderen.  
Samtidig høres noen korte pip omtrent hvert femte minutt, noe som indikerer lavt batteri, mens skjermen nedenfor vises:





## Kunder og avsendere

Før du kan kode en sender i mottakeren, må du opprette en klient som senderen tilhører.

En klient kan være en person, et rom eller noe annet. Klienten kan for eksempel være "Sven Andersønn" (brukt som eksempel).

Vår klient "Sven" kan ha en eller flere sendere koblet til seg.

Sven (vår oppdragsgiver) har for eksempel en armbåndssender, en sengealarm, en bevegelsessensor og andre produkter.

Når "Sven" aktiverer alarm fra produktene sine, viser displayet at alarmen kommer fra "Sven" og hvilket produkt som er avsender, slik at årsaken til alarmen er kjent fra begynnelsen.

Dette forutsetter selvsagt at navn etc. er kodet på ønsket måte.

### Klienter opprettet under Innstillinger / Klient / Ny klient:



| Hovedmeny   | Innstillinger  | Klienter    |
|---|--|-------------|
| ↑ Slå av (sove)<br>Gruppevalg<br>Vibrasjon: På<br>Lyd: Høy<br>→ Innstillinger | Ver: 3.8.1<br>ID: 123456<br>→ Klienter<br>Gruppeoppset<br>Still klokke | → Ny klient |

### Legg til under Innstillinger / Klient / Klient (Sven) / Ny avsender:

| Hovedmeny   | Innstillinger  | Klienter                                   | Sven  |
|---|--|--|---|
| ↑ Slå av (sove)<br>Gruppevalg<br>Vibrasjon: På<br>Lyd: Høy<br>→ Innstillinger | Ver: 3.8.1<br>ID: 123456<br>→ Klienter<br>Gruppeoppset<br>Still klokke | → Ny klient<br><b>Sven</b><br>Alle sendere | Rom 10<br>→ TX901<br>Tilføy sender<br>Gruppe valg<br>Klientnavn |







## Hovedmeny

Trykk på  og  samtidig, enten når skjermen er av eller på startskjermen, åpnes hovedmenyen. Den grønne pilen til venstre viser hvilken linje i menyen som kan velges.




### Menybetjening:

- Trykk  for å flytte den grønne pilen enten opp eller til høyre i menyen.
- Trykk  for å flytte den grønne pilen enten ned eller til venstre i menyen.
- Trykk  for å gå ut av menyen.
- Trykk  for å velge menyelementet med den grønne pilen ved siden av.

**MERK:** Etter ca 60 sekunder med inaktivitet, lukkes menyen automatisk.


### Siste alarm:

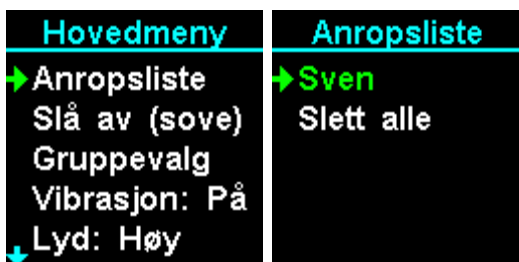


  Bla mellom ulike alarmer.

**GRØNN** Betyr at alarmen ble akseptert.  
**RØD** Betyr at alarmen ble avvist.  
**GUL** Betyr at alarmen ble ubesvart.

### Se mer informasjon om alarmene:

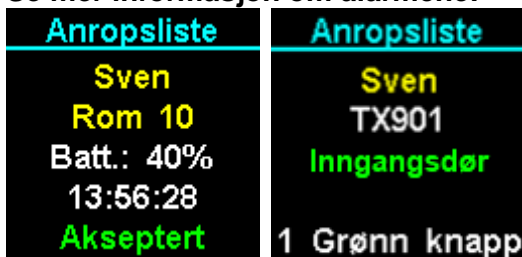

 Se klientens posisjonering og hvilken sender alarmen kommer fra.

  Bla mellom flere alarmer.





Ved mottak av alarm fra en sender som har f.eks. en melding om lavt batterinivå vises.

  for å bla mellom andre alarmanrop.






Slett anropslisten:




-  For å bekrefte.
-  Gå tilbake til menyen.

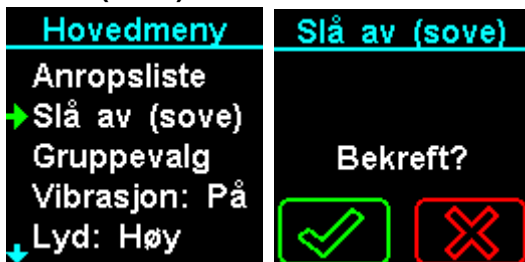





Slå av (sove) mottakeren:

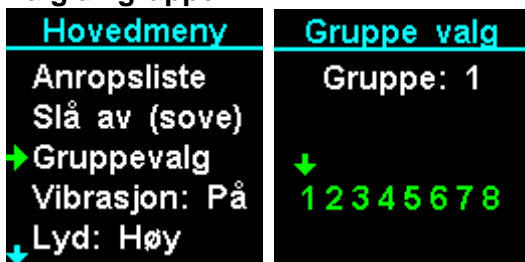


-  For å bekrefte.
-  Gå tilbake til menyen.



Valg av gruppe:




-  Velge/oppheve valget av en gruppe.
-  Gå tilbake til menyen.
-   Velg gruppe.
-  Gruppen er valgt
-  Gruppen er ikke valgt

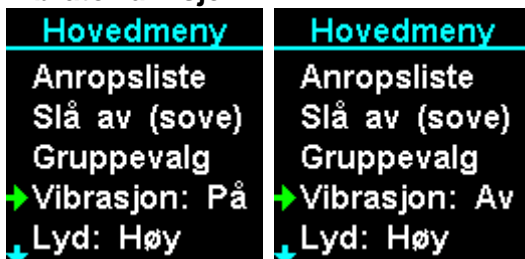Vibratorfunksjon:



-  Aktivere (På) eller deaktivere (Av) vibrasjonen.
-  Gå tilbake til menyen.

Lydinnstilling:

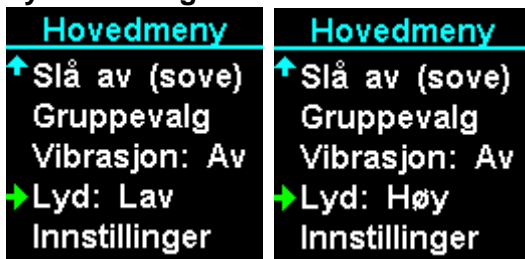

-  Velge mellom **Høy**, **Lav** eller **Av**



## Innstillinger og koding:

| Hovedmeny   | Innstillinger  | Innstillinger  | Innstillinger  |
|---|--|--|--|
| ↑ Slå av (sove)<br>Gruppevalg<br>Vibrasjon: Av<br>Lyd: Lav<br>→ Innstillinger | Ver: 3.8.1<br>ID: 123456<br>→ Klienter<br>Gruppoppsett<br>↓ Still klokke | ↑ Klikk: Lav<br>Produktnavn<br>Passord<br>→ KNOP-knapp<br>↓ Posisjoner | ↑ Passord<br>KNOP-knapp<br>Posisjoner<br>Språk<br>→ Slå av |

Ver: 3.3.14

Produktets programvareversjon.

ID: 58651

Produktets serienummer.

### Legg til ny klient:

| Innstillinger  | Klienter                                   |
|--|--|
| Ver: 3.8.1<br>ID: 123456<br>→ Klienter<br>Gruppoppsett<br>↓ Still klokke | → Ny klient<br><b>Sven</b><br>Alle sendere |

Plasser pilen på menyvalget og trykk **Ent**.**Esc** Gå tilbake til menyen

### Endre klient:

| Innstillinger  | Klienter                                   |
|--|--|
| Ver: 3.8.1<br>ID: 123456<br>→ Klienter<br>Gruppoppsett<br>↓ Still klokke | Ny klient<br>→ <b>Sven</b><br>Alle sendere |

| Sven           |
|----------------|
| Rom 10         |
| → <b>TX901</b> |

Kundens navn.

Valgfri tekst, navn på f.eks. rom.

Produkt som allerede er kodet på klienten .



Legg til sender:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Sven  | Tilføy sender                |
| Rom 10<br>TX901<br>→ Tilføy sender<br>Gruppe valg<br>↓ Klientnavn | Aktiver ny sender...<br><br> |

Aktiver nå ønsket sender.

|  |
|--|
| Tilføy sender                            |
| ID: 64067<br>RX901B<br>Legg til?<br><br> |

Godta utvidelser.

|  |
|--|
| Tilføy sender                            |
| Overfør fra:<br>Arne<br>Bekreft?<br><br> |

Hvis senderen allerede er kodet, vil menyen nedenfor vises, slik at du kan flytte en sender mellom klienter.

Gruppe valg (klient):

|   |   |
|---|---|
| Sven  | Sven  |
| Zimmer 10<br>TX901<br>Tilføy sender<br>→ Gruppevalg<br>↓ Klientnavn | Gruppe<br><br>Gruppe: 1<br>↓<br>1 2 3 4 5 6 7 8 |

Flytt mellom grupper.

Velge gruppe.

Gå tilbake til menyen

Gruppe valgt.

Gruppe valgt bort.

Klientens navn :

|  |  |
|--|--|
| Sven   | Klientnavn   |
| ↑ TX901<br>Tilføy sender<br>Gruppe valg<br>→ Klientnavn<br>↓ Valgfri tekst | Lagre?<br>◀ 456789 a b c d<br>Sven <br>Skriv inn klientnavn. |

Flytte bokstav.

Velge bokstav.

Slett siste bokstaven.

Lagre, velg symbol ◀ og trykk på .

Valgfri tekst:

|   |   |
|---|---|
| Sven  | Sven  |
| ↑ Ny sender<br>Gruppe<br>Klientnavn<br>→ Tekst<br>Fjern | Lagre?<br>◀ 456789 a b c d<br>Rom 10<br>Skriv inn klienttekst |

Flytte bokstav.

Velge bokstav.

Slett siste bokstaven.

Lagre, velg symbol ◀ og trykk på .



Fjern klienten:

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <b>Sven</b>     | <b>Sven</b>              |
| ↑ Tilføy sender | Ta bort:                 |
| Gruppevalg      | Sven                     |
| Klientnavn      | Bekreft?                 |
| Klienttekst     | <input type="checkbox"/> |
| → Ta bort       | <input type="checkbox"/> |

**Ent** Bekreft ta bort klienten.

**Esc** Gå tilbake til menyen



Endre kodet sender:

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <b>Klienter</b><br>Ny klient<br>→ <b>Sven</b><br><b>Arne</b><br>Alle sendere | <b>Sven</b><br>Rom 10<br>→ <b>TX901</b><br>Tilføy sender<br>Gruppevalg<br>Klientnavn | <b>Sven</b><br>TX901<br>ID: 35000<br>Ver.: 1.3<br>Batt.: 40%<br>Anropssignal 1 | <b>Sven</b><br>Anropssignal 1<br>Sendertekst<br>Anropssignal<br>→ Anropstekst<br>Anrop:Alle | <b>Sven</b><br>Anropssignal<br>Anropstekst<br>Anrop:Alle<br>Timer<br>→ Ta bort |
|--|--|--|---|--|

|                |
|----------------|
| TX901          |
| ID: 60372      |
| Ver.: 1.0      |
| Anropssignal 1 |

Produktnavn på senderen.  
Avsenders ID.  
Senderprogramvare versjon.  
Valgt anropssignal når alarm mottas.

Endre senderens tekst:

|   |  |
|---|--|
| <b>Sven</b><br>Anropssignal 1<br>Sendertekst<br>Anropssignal<br>→ Anropstekst<br>Anrop:Alle | <b>Sendertekst</b><br><b>Lagre?</b><br>◆ 456789 a b c d<br>Arm<br>Skriv inn<br>sendertekst |
|---|--|

Flytte bokstav.  
 Velge bokstav.  
 Slett siste bokstaven.  
Lagre, velg symbol ◆ og trykk på .

Endre anropssignalet:

|   |  |
|---|--|
| <b>Sven</b><br>Batt.: 40%<br>Anropssignal 1<br>Sendertekst<br>→ Anropssignal<br>Anropstekst | <b>Sven</b><br>TX901<br>Anropssignal 1<br>↓<br>1 2 3 4 5 |
|---|--|

Velge anropssignaler.  
 Lagre nyt signal.  
 Gå tilbake til menyen

Endre anropstekst:

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Sven</b><br>Sendertekst<br>Anropssignal<br>→ Anropstekst<br>Anrop:Alle<br>Timer | <b>1 Grønn knapp</b><br>Alarm knapp<br>→ 1 Grønn knapp<br>2 Rød knapp<br>3 Gul knapp<br>4 Blå knapp | <b>1 Grønn knapp</b><br>Alarm knapp<br>→ 1 Grønn knapp<br>2 Rød knapp<br>3 Gul knapp<br>4 Blå knapp |
|--|---|---|

Her er et TX901 eksempel.

Gjenopprett anropstekst:

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Sven</b><br>Sendertekst<br>Anropssignal<br>→ Anropstekst<br>Anrop:Alle<br>Timer | <b>Anropstekst</b><br>Ekstern 2<br>Ekstern 3<br>Ekstern 4<br>Batteri tom<br>→ Nulstil tekster | <b>Anropstekst</b><br>Nulstil tekster<br><br>Bekreft?<br> |
|--|---|---|





Alarm:

| Sven           | Sven          |
|----------------|---------------|
| ↑ Sendertekst  | ↑ Sendertekst |
| Anropssignal   | Anropssignal  |
| Anropstekst    | Anropstekst   |
| → Anrop:Normal | → Anrop:Alle  |
| ↓ Timer        | ↓ Timer       |

- Ent Veksle mellom **Normal** og **Alle**.
- Esc Gå tilbake til menyen

Timerinnstilling av senderen:

| Sven           | Sven          |
|----------------|---------------|
| ↑ Anropssignal | → Timer: På   |
| Anropstekst    | Start 1 00:00 |
| Anrop:Normal   | Stop 1 00:00  |
| → Timer        | Start 2 00:00 |
| Ta bort        | Stop 2 00:00  |

- Ent Veksle mellom **Av** og **På**.
- ↓ ↑ Endre tiden.
- Ent Skift mellom timer/minutter.

Fjern senderen:

| Sven           | Sven                                |
|----------------|-------------------------------------|
| ↑ Anropssignal | Ta bort:                            |
| Anropstekst    | TX901                               |
| Anrop:Normal   | Bekreft?                            |
| Timer          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| → Ta bort      | <input type="checkbox"/>            |

- Ent Bekreft ta bort senderen.
- Esc Gå tilbake til menyen



## Gruppeoppsetning:

| Innstillinger  | Gruppoppset     |
|----------------|-----------------|
| Ver: 3.8.1     | Gruppe: 1       |
| ID: 123456     |                 |
| Klienter       | ↓               |
| → Gruppoppset  | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| ↓ Still klokke |                 |

- ↓ ↑ Flyt mellom grupper.
- Ent Velge gruppen.

## Aktiveringstiden fra og til:

| Gruppe: 1   | Gruppe: 1   |
|-------------|-------------|
| → Timer: På | → Timer: Av |
| Gruppenavn  | Gruppenavn  |
| Timer       | Timer       |

- Ent Veksle mellom "Av" og "På".
- Esc Gå tilbake til menyen.

Tips: Ikke glem å stille inn tiden i "innstillinger - still klokken".

## Endre gruppenavn:

| Gruppe: 1    | Gruppe: 1             |
|--------------|-----------------------|
| Timer: Av    | Lagre?                |
| → Gruppenavn | ◆ 4 5 6 7 8 9 a b c d |
| Timer        | Gruppe: 1             |
|              | Skriv inn gruppenavn  |

- ↑ ↓ Flytte bokstav.
  - Ent Velge bokstav.
  - Esc Slett siste bokstaven.
- Lagre, velg symbol ◆ og trykk på Ent.

## Endre aktiveringstiden:

| Gruppe: 1  | Gruppe: 1    |
|------------|--------------|
| Timer: Av  | Start 07 :00 |
| Gruppenavn | Stop 15 :00  |
| → Timer    |              |

- ↓ ↑ Endre timer og minutter.
- Ent Veksle mellom timer og minutter.
- Esc Gå tilbake til menyen.

## Still inn klokken:

| Innstillinger  | Still klokke |
|----------------|--------------|
| ↑ ID: 123456   | 28-10-2022   |
| Klienter       | 10:56        |
| Gruppoppset    | Automatisk   |
| → Still klokke | År: 2022     |
| ↓ Klikk: Lav   |              |

- ↓ ↑ Endre.
- Ent Veksle mellom år, måneder, klokkeslett, dato.

**Merk:** Hvis mottakeren mottar en klokkeoppdatering fra et KNOP-produkt eller USB901, stilles klokken automatisk deretter.



## Tastatur klikk:

| Innstillinger | Innstillinger |
|---------------|---------------|
| ↑ Klienter    | ↑ Klienter    |
| Gruppoppset   | Gruppeoppset  |
| Still klokke  | Still klokke  |
| → Klikk: Lav  | → Klikk: Høy  |
| ↓ Produktnavn | ↓ Produktnavn |

**Ent** Veksel mellom **Lav**, **Høy** og **Av**.

**Esc** Gå tilbake til menyen

## Endre mottakerens navn:

| Innstillinger | Navn            |
|---------------|-----------------|
| ↑ Gruppoppset | Lagre?          |
| Still klokke  | ◆456789 a b c d |
| Klikk: Lav    | RX901C          |
| → Produktnavn | Skriv inn       |
| ↓ Passord     | produktnavn     |

↑ ↓ Flytte bokstav.

**Ent** Velge bokstav.

**Esc** Slett siste bokstaven.

Lagre, velg symbol ◆ og trykk på **Ent**.

## Velg et passord:

| Innstillinger  | Passord    |
|----------------|------------|
| ↑ Still klokke | Ny kode    |
| Klikk: Lav     | Kode: 1234 |
| Produktnavn    |            |
| → Passord      |            |
| ↓ KNOP-knapp   |            |

↑ ↓ Endre nummeret (0 til 9).

**Ent** Velge nummer.

**Esc** Slet siste sifferet.

Koden skal alltid være på 4 sifre.

## Endre funksjonen på KNOP-logoen:

| Innstillinger | KNOP-knapp    |
|---------------|---------------|
| ↑ Klikk: Lav  | → Anrop: Alle |
| Produktnavn   |               |
| Passord       |               |
| → KNOP-knapp  |               |
| ↓ Systemmeny  |               |

**Ent** Velg mellom **Frakoblet**, **Normal** eller **Alle**.


## Tilkobling og endring av systemkode:

| Innstillinger | Systemmeny     |
|---------------|----------------|
| ↑ Produktnavn | → System: Från |
| Passord       | ID: 0          |
| KNOP-knapp    |                |
| → Systemmeny  |                |
| ↓ Posisjoner  |                |

**Ent** Veske system **Av** eller **På**.




Angi system-ID:

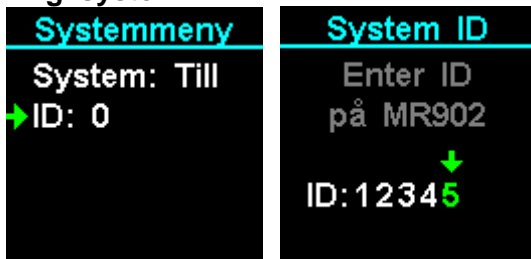


- Endre verdien (0 til 9).
- Velg nummer.
- Slette det siste sifferet.

Posisjoner:

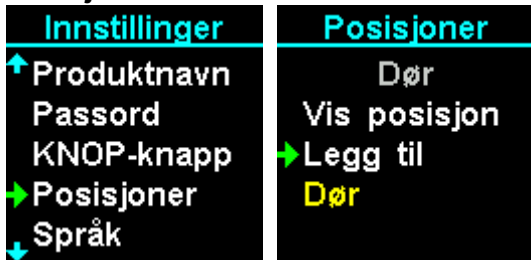


Nåværende posisjon.  
Allerede kodet.

Vis posisjon:

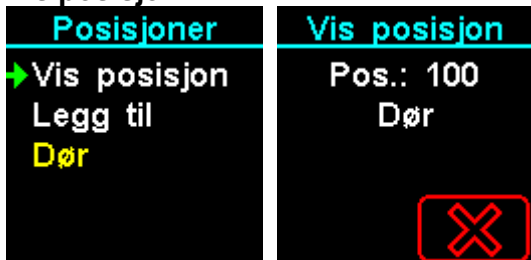

Viser gjeldende posisjon der du er.

Legg til posisjon:

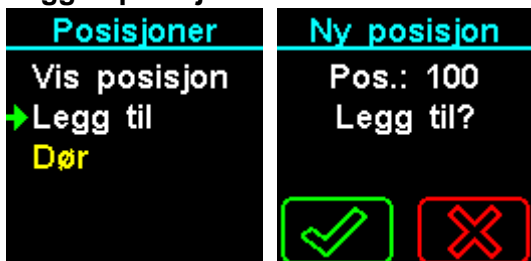

Lagre posisjon

Merk at det mottatte må være innenfor rekkevidden til et posisjonsfelt.

Endre posisjonsnavn:



Flytte bokstav.

Velge bokstav.

Slett siste bokstaven.

Lagre, velg symbol ♦ og trykk på .



## Fjern posisjon:



Trykk **Ent** for å slette posisjon.

## Språk innstilling:



Flytte språkvalgpilen.

**Ent** Lagre valgt språk.

## Slå av mottaker:



**Ent** Bekreft slå av.

Slå på mottakeren igjen ved å legge mottakeren på laderen.



## ***Vedlikehold***

### **Programvareoppdatering av RX901B:**

Det er mulig å oppdatere programvaren i RX901B, samt å laste ned og overføre innstillinger ved hjelp av KNOptool. For ytterligere beskrivelser se KNOptool-manualen.

## ***Rengjøring***

Produktet kan rengjøres med en myk klut eller en tørkeklut.

## ***Resevedele & tilbehør***

Resevedele og tilbehør kan bestilles fra Knop Elektronik A/S, se [www.knop.dk](http://www.knop.dk)



## **Sjekk dekningsområdet**

En person aktiverer en sender (for eksempel TX901) med korte mellomrom, mens en annen person går systematisk rundt i området og markerer på en skisse av bygget og området der det er dekning. Skissen er plassert på kontoret slik at alle som skal drifte systemet kan se hvor det er dekning. Utenfor dekningsområdet kan ikke alarmer mottas.

Dekningsområdet kan utvides ved hjelp av KNOP-repeatersystemet.

Kontakt din forhandler for mer informasjon.



## Tekniske data

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Batteri:</b>               | Litiumbatteri, LP 403040 3,7V 450mA  |
| <b>Driftstid med batteri:</b> | Ca. 3 dager med 50 alarmanrop per dag.                                       |
| <b>Opplasting:</b>            | Trådløs, ca. 4 timer .   |
| <b>Strømforsyningsenhet:</b>  | 230VAC adapter USB 5VDC/1.0A   |
| <b>Frekvens HF:</b>           | 869,2125 MHz <sup>(1)</sup>  |
| <b>Rekkevidde :</b>           | Opptil 1500 m fri rekkevidde for en RX901B <sup>(2)</sup>                    |
| <b>Skjerm:</b>                | Grafisk LCD  |
| <b>Menytekster:</b>           | dansk, norsk, svensk, finsk, engelsk.  |
| <b>Loggfunksjon:</b>          | Lagrer de siste 50 alarmanropene.  |
| <b>Minne:</b>                 | 250 sendere<br>150 stillinger POS901   |
| <b>Omgivelse:</b>             | Innendørs bruk. <90 % fuktighet uten kondens.                                |
| <b>Omgivelsestemperatur :</b> | 0 - 40°C   |
| <b>Skaptype:</b>              | Farge RAL9003 ABS  |
| <b>Skapmål:</b>               | 45 x 90 x 16 mm.<br>Inkl. nakkestropp med sikkerhetslås som ryker ved trekk. |
| <b>Tetthet:</b>               | IP65   |
| <b>Vekt inkl. batterier:</b>  | 56g  |

Retten til endringer forbeholdes

Alle rettigheter forbeholdt.














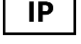
© **KNOP** Elektronik A/S

<sup>(1)</sup> Ved tilkopling til KNOPs repeatersystem brukes også 868.049 /100/150 MHz.

<sup>(2)</sup> Målt utendørs med fri sikt mellom sender og mottaker. I bygninger reduseres rekkevidden.



## Symbolforklaring og godkjenninger

|   |  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|---|--|-----------------------|-----|------------------------|-------|----------------------|------|----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------|----------------------|
|    | <p><b>Dette produktet er i samsvar med disse direktivene og standarder:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Directive 2017/745/EU</td> <td>MDR</td> </tr> <tr> <td>Directive 1907/2006/EU</td> <td>REACH</td> </tr> <tr> <td>Directive 2011/65/EU</td> <td>RoHS</td> </tr> <tr> <td>ISO 14971:2019</td> <td>Risk Management for Medical devices</td> </tr> <tr> <td>EN 301 498-1 V2.2.3</td> <td>Electro Magnetic Compatibility</td> </tr> <tr> <td>EN 301 489-3 V3.1.1</td> <td>Electro Magnetic Compatibility</td> </tr> <tr> <td>EN 50130-4:2011 + 2014</td> <td>Immunity alarm systems</td> </tr> <tr> <td>EN 300 220-1 V3.1.1</td> <td>Short Range Devices</td> </tr> <tr> <td>EN 300 220-2 V3.1.1</td> <td>Short Range Devices</td> </tr> <tr> <td>EN 300 220-3 V2.1.1</td> <td>Short Range Devices</td> </tr> <tr> <td>EN 60601-1-2:2014 + 2015</td> <td>Electromagnetic compatibility (Medical)</td> </tr> <tr> <td>EN 62368-1:2020</td> <td>Electrical safety</td> </tr> <tr> <td>EN 50581:2012</td> <td>Hazardous substances</td> </tr> </table> | Directive 2017/745/EU | MDR | Directive 1907/2006/EU | REACH | Directive 2011/65/EU | RoHS | ISO 14971:2019 | Risk Management for Medical devices | EN 301 498-1 V2.2.3 | Electro Magnetic Compatibility | EN 301 489-3 V3.1.1 | Electro Magnetic Compatibility | EN 50130-4:2011 + 2014 | Immunity alarm systems | EN 300 220-1 V3.1.1 | Short Range Devices | EN 300 220-2 V3.1.1 | Short Range Devices | EN 300 220-3 V2.1.1 | Short Range Devices | EN 60601-1-2:2014 + 2015 | Electromagnetic compatibility (Medical) | EN 62368-1:2020 | Electrical safety | EN 50581:2012 | Hazardous substances |
| Directive 2017/745/EU   | MDR  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
| Directive 1907/2006/EU  | REACH  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
| Directive 2011/65/EU  | RoHS   |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
| ISO 14971:2019  | Risk Management for Medical devices  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
| EN 301 498-1 V2.2.3   | Electro Magnetic Compatibility   |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
| EN 301 489-3 V3.1.1   | Electro Magnetic Compatibility   |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
| EN 50130-4:2011 + 2014  | Immunity alarm systems   |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
| EN 300 220-1 V3.1.1   | Short Range Devices  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
| EN 300 220-2 V3.1.1   | Short Range Devices  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
| EN 300 220-3 V2.1.1   | Short Range Devices  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
| EN 60601-1-2:2014 + 2015  | Electromagnetic compatibility (Medical)  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
| EN 62368-1:2020   | Electrical safety  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
| EN 50581:2012   | Hazardous substances   |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|    | <p>Produktet må ikke brukes hvis emballasjen er skadet.</p>  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|    | <p><b>Medisinsk produkt</b><br/>Klasse 1</p>   |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|    | <p><b>Produsent</b><br/>KNOP Elektronik A/S, Fabriksvej 20, DK-7600 Struer, Danmark</p>  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|  | <p>Les manual(er) før installasjon og igangkjøring.</p>  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|  | <p>Interferens kan oppstå i omgivelser med utstyr merket med dette symbolet.</p>   |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|  | <p>Må beskyttes mot væske.</p>   |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|  | <p>0 °C til +40 °C, temperaturgrense for transport/lagring og bruk.</p>  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|  | <p>Produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.</p>  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|  | <p><b>Individuelt registreringsnummer</b><br/>DK-MF-000025631</p>  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|  | <p><b>Unik enhetskode for å identifisere enheten</b><br/>05744002850298</p>  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|  | <p><b>Produktreferanse/produktnummer</b><br/>Mottaker RX901B, inkl. trådløs lader</p>  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|  | <p><b>Serienummer</b><br/>Plassert på produktet</p>  |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |
|  | <p><b>IP-klasse</b><br/>IP65</p>   |                       |     |                        |       |                      |      |                |                                     |                     |                                |                     |                                |                        |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |   |                 |                   |               |                      |